

Aan de slag met Q-interactive!

Q-interactive starters handleiding




In deze handleiding vind je de instructies voor het installeren van de nieuwe Q-interactive Assess-app met de juiste instellingen op de testleider en cliënt iPad, het instellen van je accountgegevens, en het klaarzetten van een oefen testafname. We raden aan om de tests een aantal keer te oefenen voorafgaand aan een echte afname bij cliënten. Dit mag weg, die kunnen we nog niet aanbieden op dit moment. Geen pagina , geen E-learning etc.

Sectie 1: Download de app



Om gebruik te maken van het platform dient de Q-interactive Assess app op beide iPads gedownload te worden.

STEP 1

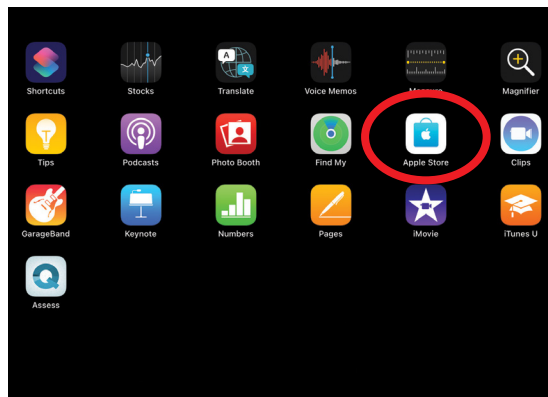

Open the App Store, found on the home screen of the iPad.

STEP 2

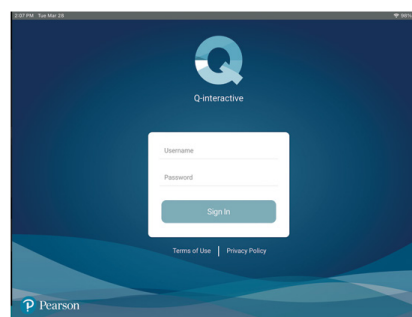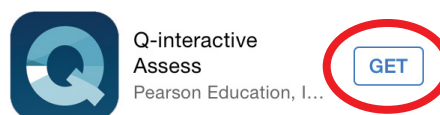


Search for Q-interactive and tap on "GET."

Sectie 2: Configureer de iPads

Zodra de Assess app gedownload is kunnen de instellingen op beide iPads geconfigureerd worden. Dit is belangrijk om een aantal redenen:

- De iPads moeten correct gekoppeld worden om gegevens op beide iPads met elkaar te laten integreren.
- Zodat stimuli op een standaard manier weergegeven worden.
- Zodat de testafname via Q-interactive soepel verloopt.
- Om eventuele afleidende factoren te elimineren voorafgaand aan de testafname.

Stap 1:

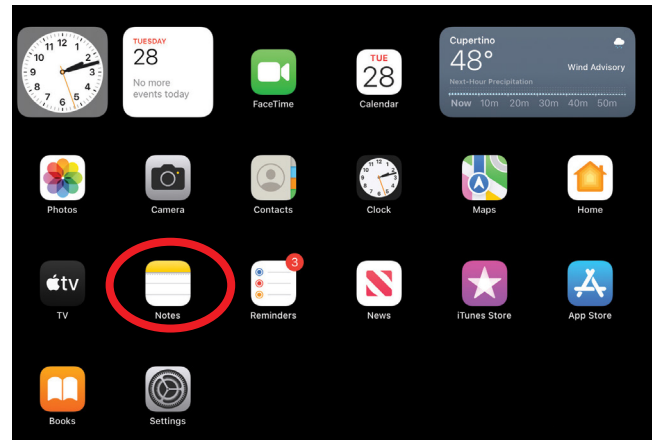

Klik op 'instellingen'

Stap 2:

Stel de iPads in volgens de onderstaande tabel. De Q-interactive Assess app maakt gebruik van Wi-Fi om de testleider en cliënt iPads met elkaar te verbinden. Er moet verbinding zijn met een werkend Wi-Fi netwerk om afname- en clientgegevens te downloaden en synchroniseren. Het is niet noodzakelijk om verbonden te zijn met Wi-Fi om afnames uit te voeren, wel dient Wi-Fi ingeschakeld te zijn op beide iPads.

Testleider iPad	Cliënt iPad	Instelling	Menu	Optie
•	•	Wi-Fi	Wi-Fi inschakelen	Seleeteer Network
•	•	Algemeen	Toetsenbord	Schakel Automatische Hoofdletters Uit
•	•	Algemeen	Toetsenbord	Schakel Autocorrectie Uit
	•	Scherf & Helderheid	Helderheid	[TBD]
	•	Scherf & Helderheid	Night Shift	Uit
	•	Scherf & Helderheid	True Tone	Schakel Truetone Uit
•	•	Scherf & Helderheid	Automatish Slot	15 Minuten
	•	Toegankelijkheid	Weergavezoom	Schakel Automatische Helderheid Uit

Sectie 3 Testafname klaarzetten

Dit proces begint bij de welkomst e-mail die je hebt ontvangen om je accountgegevens te bevestigen.


Stap 1



De "klik hier" link opent het scherm om je Q-interactive wachtwoord aan te maken.


Na het bevestigen van je wachtwoord en het accepteren van de algemene voorwaarden van Q-interactive, ben je klaar om een oefen testafname klaar te zetten.

Stap 2

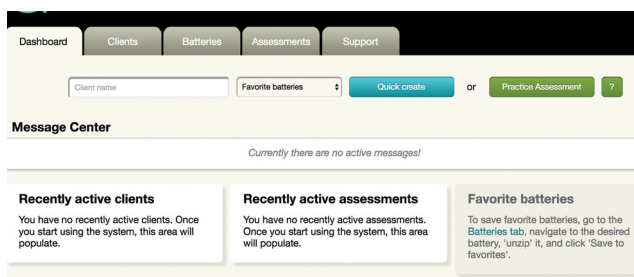


Vanuit de Dashboard tab, klik je op de oefentest button om een oefen cliënt profiel aan te maken en op te slaan.

Stap 3

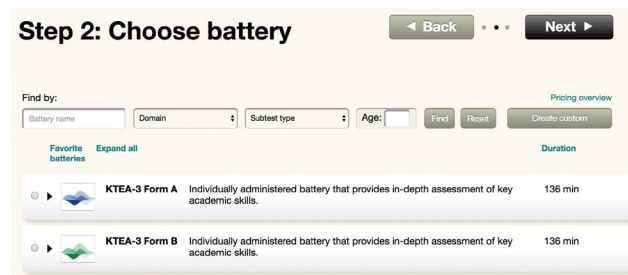

Selecteer testbatterij door te klikken op de linker knop, klik daarna op "volgende".

Stap 4

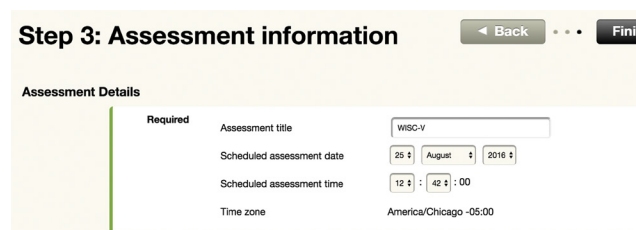

Selecteer de tijd en datum van de oefen testafname en klik op "af afronden".


Stap 5




Klik op de knop om de gegevens naar de iPads te verzenden. Nu ben je klaar om in te loggen.

Stap 6

Log op beide iPads in met dezelfde accountgegevens.

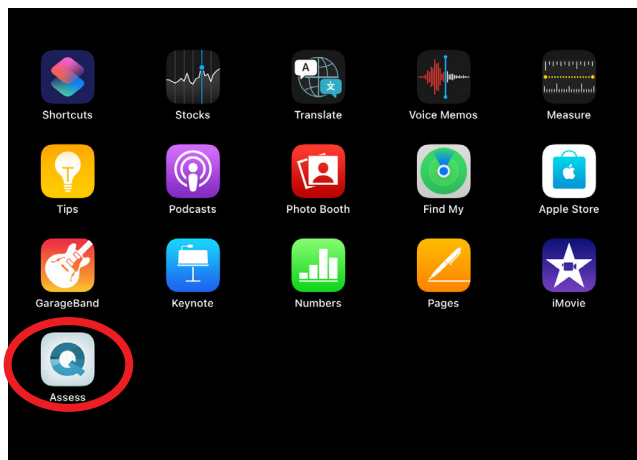


Stap 7

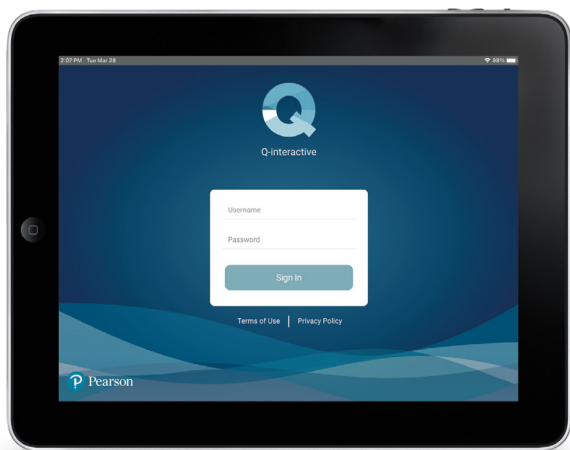

Voer je gebruikersnaam en wachtwoord in.

Wacht tot de volledige testbibliotheek gedownload is. Wanneer juist geconfigureerd, verbinden beide iPads met elkaar zodra je de testafname start.

Stap 8

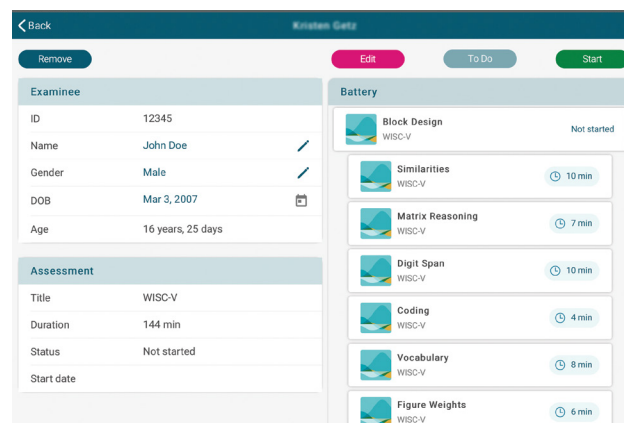

Klik op de startknop om de testafname te beginnen. Oefen testafnames hebben dezelfde functionaliteiten als echte afnames, behalve de standaard en nul scores.

Gefeliciteerd! Je bent klaar om te starten met Q-interactive!

Volg de gratis online [Q-interactive training](#) voor uitgebreide instructies over het platform.

+31 (0)20 581 5500 | Pearson Clinical Benelux

Copyright © 2023 Pearson Education, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Pearson and Q-interactive are trademarks, in the US and/or other countries, of Pearson plc. iPad is a registered trademark of Apple Inc. C5429 SR 05/23